

# Masque magnétique avec poches gel

## Les bienfaits de la magnétothérapie

Ce masque intègre 3 puissants aimants néodyme (Ø 15 mm, 12 200 gauss), qui stimulent la circulation sanguine autour des yeux et aident à détendre les muscles oculaires. Cette action contribue à :

- Réduire la fatigue visuelle, notamment après une exposition prolongée aux écrans.
- Apaiser les tensions liées au stress, favorisant ainsi une meilleure relaxation.
- Atténuer les sensations de lourdeur et les maux de tête.

## + L'effet apaisant des poches de gel

En fonction de vos besoins, les poches de gel du masque peuvent être utilisées à froid ou à chaud pour un effet ciblé :

### Thérapie par le froid :

- Diminue les poches et cernes en resserrant les vaisseaux sanguins.
- Apaise les yeux fatigués ou irrités, idéal en cas d'exposition prolongée aux écrans ou d'allergies.
- Soulage les maux de tête et migraines grâce à son effet anesthésiant naturel.

## Thérapie par la chaleur :

- Détend les muscles oculaires, idéale après une journée éprouvante.
- Favorise la décongestion des sinus, apportant un soulagement en cas de rhume ou d'allergies.
- Améliore la circulation sanguine, aidant à réduire les tensions autour des yeux.

## Un confort optimal pour une relaxation totale

Taille unique, s'adapte à toutes les morphologies grâce à sa sangle élastique ajustable.

Housse en coton douce et respirante pour un contact agréable avec la peau.

Utilisation simple et pratique, à la maison, au bureau ou en voyage.

Idéal pour un moment de détente après une longue journée ou pour améliorer la qualité de votre sommeil, le Masque Magnétique de Relaxation Gel est votre allié bien-être au quotidien !

**Contient** : 1 masque avec 3 aimants néodyme ø 15 mm, rémanence 12 200 gauss. Sangle élastique réglable + 2 poches gel + 1 housse en coton doux. Taille unique. Coloris noir. Produit mixte (convient aux hommes comme aux femmes).

### MODE D'EMPLOI DE LA POCHE GEL

La poche gel doit être réchauffée ou refroidie **sans sa housse**.

- À chaud : micro-ondes : 25 secondes (puissance 600 W).
- À froid : congélateur : 4 H entre - 12° et - 22°C.

**Ne pas conserver la poche gel au congélateur.**

Récupérez la poche de gel – froide ou chaude – selon la

méthode de soulagement choisie. Insérez la poche gel dans les creux inférieurs du masque et recouvrir avec la housse de telle sorte que l'ouverture se retrouve à l'extérieur du masque. Placez la partie fermée sur vos yeux, puis la sangle autour de votre tête, réglez la sangle élastique selon votre tour de tête, fermez les yeux et laissez agir. Pensez à l'emporter lors de vos déplacements !

## **Avertissement concernant la poche gel**

Ne jamais appliquer directement la poche gel sur la peau à chaud comme à froid. Ne pas appliquer sur une peau lésée. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 24 mois. **USAGE EXTERNE – NE PAS PERCER – NE PAS UTILISER SI LA POCHE GEL EST ENDOMMAGÉE.**

COMPOSITION MASQUE : Jersey polyester. Mousse : polyuréthane.

COMPOSITION HOUSSE : Coton – Élasthane.

COMPOSITION GEL à base de : Eau – Monopropylène glycol – Chlorure de sodium.

CONSEIL D'ENTRETIEN DU MASQUE ET DE LA HOUSSE : lavage à la main. Séchage à plat. Ne pas repasser.